



Artikelnummer 1000012709

ABENA®

Fixeringsbody, ABENA, S, vit, blyxtlås i benutskärning och axelsöm, sömlös

- ✓ Mjuk, andningsbar kroppstrumpa för fixering av inkontinensskydd
- ✓ Flexibelt och töjbart material för en tät passform som håller inkontinensskyddet på plats
- ✓ Inga sömmar som ger tryckmärken och hudirritation
- ✓ Blyxtlåsen i grenen och axeln gör det enkelt att använda och justera
- ✓ Styckförpackad



Produktbeskrivning

Kroppstrumpa i textil för fixering av inkontinensskyddet – bärs som helkroppssunderkläder. Abri-Fix Bodystocking är en mjuk och flexibel kroppstrumpa i bomull med ärmor och ben. Bomullsmaterialet säkerställer att huden hålls torr och garanterar användarkomforten. Den sömlösa sticktekniken – ett innovativt koncept för att göra kläder med nästan inga sömmar – förhindrar tryckmärken och hudirritation. Det finns blyxtlås i ben-, gren- och axelområdet vilket gör den enkel att använda och justera. Blyxtlåset är övertäckt för att skydda huden mot irritation. Storlek och tvättanvisningar anges i tyget. 75 % bomull, 20 % polyamid, 5 % elastan



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Fixeringsbody
Varumärke	ABENA
Storlek	S
Färg	Vit
Funktioner	Blyxtlås i benutskärning och axelsöm, sömlös
Material	Bomull, elastan, PA
Ingredienser/sammansättning	75 % bomull, 20 % polyamid, 5 % elastan
Längd/djup	240 mm
Bredd	130 mm
Höftmått	80-105 cm
Kön	Unisex
Märkningar	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Tvättråd	Kan tvättas i upp till 90 °C, men den bästa hållbarheten uppnås genom att tvätta vid 60 °C. Torktumla på en lätt nivå. Tål att tvättas upp till 80 gånger. Stäng blyxtlåsen innan du tvättar och placera dragskon så att den täcks helt av tyget i slutet av blyxtlåset. Krymper ca. 8 %. Användning av en tvättpåse förlänger produktens livslängd. Användning av sköljmedel rekommenderas inte.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Fixeringsbody i textil för fixering av inkontinensskydd – bärs som vanliga underkläder. Det är viktigt att välja rätt storlek baserat på höftmått för att säkerställa att den är bekväm att använda. Fixeringsbodyn kan öppnas helt (både i gren- och axelblytlåset), vilket gör den enkel att använda och justera. Justera och se till att fixeringsbodyn sitter ordentligt innan du stänger blytlåset för att förhindra att användaren eller produkten skadas. Kan tvättas i upp till 90 °C, men den bästa hållbarheten uppnås vid tvätt vid 60 °C. Stäng blytlåset innan du tvättar och placera blytlåset så att det täcks helt av tyget i slutet av blytlåset. Utsätt inte produkten för tryck som press eller utjämning, eftersom detta kan skada blytlåsen

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	12 st	40.1 cm	28.4 cm	24.1 cm	5703538390111
st	1 st				5703538390104



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.



Tål ej blekning.



Tål torktumling på låg värme.



Tål ej strykning.



Kemtvätta inte produkten.



Produkten kan tvättas upp till 100 gånger.