



DES +72

Ytdesinfektion & rengöring (tensid)

Användningsområde

DES+72 är en etanolbaserad ytdesinfektion med tensid (=rengörande verkan), avsedd för ytor kontaminerade med blod, kroppsvätskor mm. Används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via ytor och föremål. Produkten är avsedd att användas inom sjukvård, vård- och omsorg, laboratorieverksamhet etc.

Produktfakta

DES+72 är en alkoholbaserad ytdesinfektion (ca 10% IPA & ca 62% etanol) med tensid (=rengörande verkan), fri från Castoroil. Produkten är avsedd att användas på ytor som är kontaminerade med kroppsvätskor, blod eller annan orenhet. Luktat något mindre än LIV Ytdes+45. Uppfyller EN13727, EN13624 och 4-field. Har effekt på bakterier, svamp och vissa typer av virus som t ex höljesförsedda virus som Infuensavirus (H1N1, H5N1), Vaccinia virus, Herpes Simplex, HIV, Hepatit B & C, Bovine Viral Diarrhoea Virus. Effekt även mot vissa nakna virus som Murint Norovirus (surrogat till humant norovirus och Hepatit A).

Art.nr 17230001 Antal per kartong: 12* 1L 1L flaska med snäppkapsyl

Art.nr 17239300 Antal per kartong: 24* 300ml 300ml flaska med snäppkapsyl

Bruksanvisning

DES+72 är flytande och används utspädd. Spruta ut rikligt (större ytor) med desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras och stryk noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Om ytan är mindre kan desinfektionsmedlet appliceras på torkduken. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden, minimum 1min. Ytan ska lufttorka. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

Dosering

Applicera flytande koncentrat flödigt på ytan eller på en torkduk. Generell verknings tid: 1-5min. Se etikettens baksida för detaljerad information.

Innehåll

Denaturerad etanol, Aqua, Cocamidpropylamine Oxide (=tensid)

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast"

Ej helt tomma förpackningar sorteras som "farligt avfall"

