

# Suma<sup>®</sup> Med Rinse

## Koncentrerat neutralt torkmedel

### Produktbeskrivning

Suma Med Rinse är ett koncentrerat lågskummande torkmedel för instrumentdisk.

### Produktegenskaper

Suma Med Rinse är ett koncentrerat neutralt torkmedel. Produkten är formulerad för att passa alla typer av diskmaskiner. Den unika blandningen av nonjontensider minskar effektivt ytspänningen i slutspolningen. Det förhindrar fläckar och förkortar torktiden. Produkten motverkar effektivt skumbildning i diskmaskinen.

### Produktfördelar

- Ger snabb torkning av diskgodset
- Fläckfritt diskresultat utan ränder
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Effektiv skumdämpning

### Bruksanvisning

Suma Med Rinse passar alla diskmaskiner. Dosera 0,1-0,3 ml/L vid temperaturen 70-80 °C. Produkten doseras automatiskt in under maskinens slutspolning. Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden. Passar mjuka och medelhårda vatten.

### Teknisk information

Utseende:	Klar färglös vätska
pH koncentrat:	7.0
Densitet (20 °C):	1.02

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

### Skyddsföreskrifter och lagring

För fullständig information om hantering och förvaring hänvisas till säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning. Undvik extrema temperaturer.

### Att beakta

Om produkten används enligt bruksanvisning kan Suma Med Rinse användas på dom flesta vanliga förekommande material inom sjukvården.

### Förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek  
2 x 5 L

